


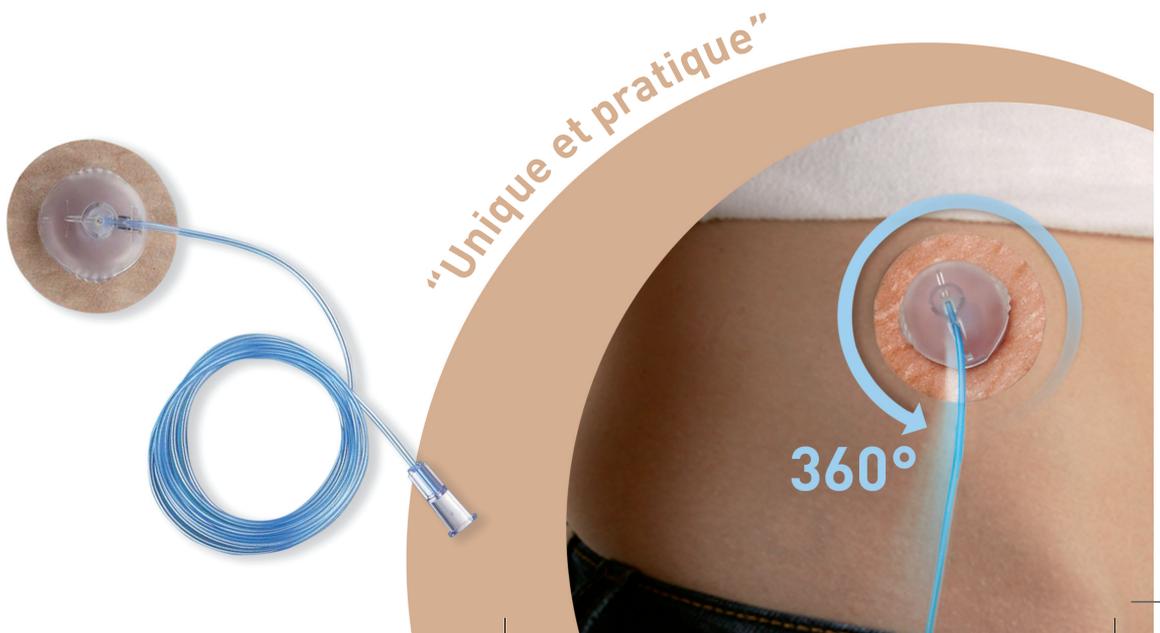

Vous **bougez...**
il **tourne !**

"C'est tellement simple"

- **Rotation à 360°** : confort d'utilisation, connexion et déconnexion sans regarder le point d'insertion et plus grand choix des sites de perfusion
- **Cathéter thermo-adhésif** : excellent maintien sur la peau et le pansement ne laisse pas de traces
- **Tubulure bleue** : identification parfaite des bulles d'air
- **Adhésif semi-transparent** et couleur chair : pour une plus grande discrétion sur la peau
- **Cathéter plat et lisse** : pour un plus grand confort
- **Canule très fine** : meilleure acceptation lors de l'insertion
- **Connexion standard luer-lock** : compatible avec la plupart des pompes à insuline




Mode d'emploi simplifié




Se laver soigneusement les mains




IMPORTANT : nettoyer la zone d'insertion du cathéter à l'aide de la lingette antiseptique fournie

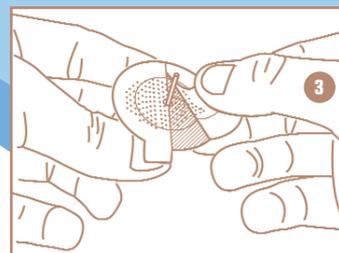


Enlever le papier de protection de l'adhésif

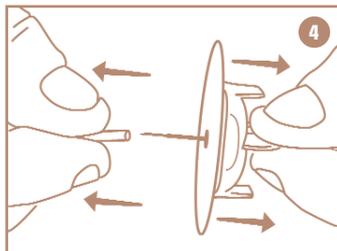


Enlever la protection de l'aiguille avec précaution

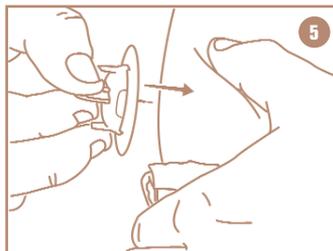


Insérer Orbit manuellement avec un mouvement rapide OU utiliser le système d'insertion automatique adapté.

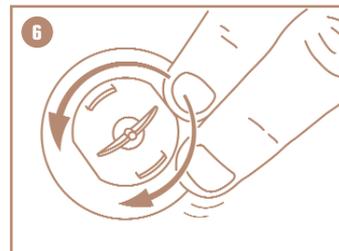


Appuyer et maintenir la bande thermo-adhésive pendant quelques secondes pour qu'elle prenne la température corporelle et qu'elle colle parfaitement

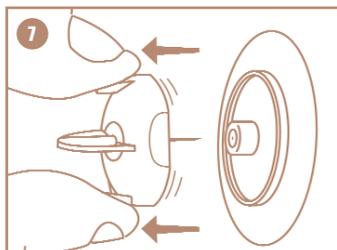


Retirer l'aiguille en pinçant les languettes de chaque côté

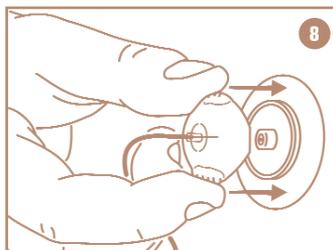

Après avoir purgé la tubulure, connecter votre tubulure avec le cathéter posé sur la peau. Un « clic » se fait entendre.

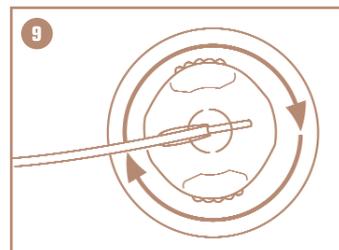

Faire pivoter le cathéter sur la gauche, la droite et vers le haut pour s'assurer de la bonne connexion.

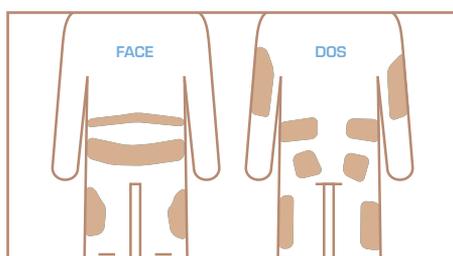

Zones d'insertion du cathéter

Références

P2461 :	Cathéter Orbit 90, canule	6mm,	60cm
P2491 :	Cathéter Orbit 90, canule	9mm,	60cm
P4261 :	Cathéter Orbit 90, canule	6mm,	105cm
P4291 :	Cathéter Orbit 90, canule	9mm,	105cm
P2451 :	Cathéter Orbit Micro, aiguille	5,5mm,	60cm

Volume de purge :

Canule de 6mm = 0,3 unités
Canule de 9mm = 0,4 unités

