# comfort<sup>™</sup> short

NOUVEAU set d'infusion pour toutes les pompes dotées d'une connexion Luer Lock.

Plus de confort et de sécurité, moins d'appréhension





### Caractéristiques :


- Technique d'insertion identique au tangentiel standard. Angle d'insertion : 20 à 45 degrés
- Canule plus courte qu'un tangentiel standard : 13 mm vs 17 mm
- Déconnection rapide et sûre sur site : « Click »
- Fenêtre de contrôle du site de perfusion
- Connexion Luer Lock
- Adhésif hypoallergénique
- Tubulure de 60, 80 et 110 cm

#### Bénéfices

- Moins d'appréhension lors de l'insertion
- Moins de douleur et meilleure acceptation
- Pas de risque de coudage de la canule

### Utilisateurs:

- Enfants
- Adultes avec IMC adapté
- Tous patients rencontrant des difficultés avec des cathéters perpendiculaires

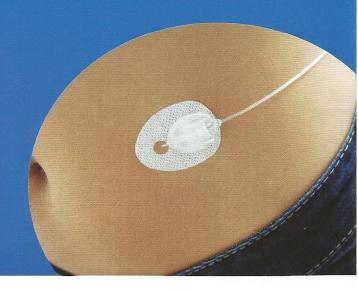





# MATHENA 06 80 08 54 88


# comfort<sup>™</sup> short

# Plus de confort et de sécurité, moins d'appréhension


## Guide de manipulation




Se laver les mains

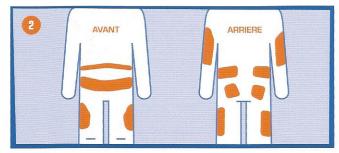


Zones d'insertion du set de perfusion

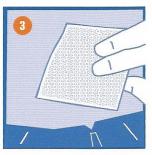


Préparer le site de perfusion

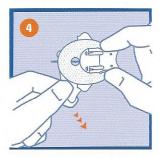


Décoller le ruban adhésif sur un seul côté

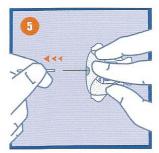


Retirer la protection de l'aiguille

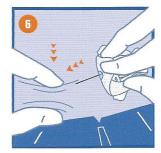


Insérer l'aiguille

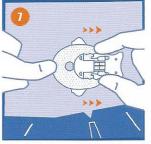

Retirer l'aiguille en pressant sur les côtés et en maintenant l'adhésif en place

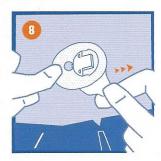

Retirer la deuxième partie du ruban adhésif

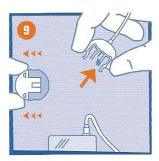

Purger la pompe avec la fonction prévue à cet effet (Fonction Purge/retour)



Connecter la tubulure au cathéter déjà inséré



Purger la canule avec 0,7 Unité

Références : 100-240-51 Comfort Short - 13mm - 60cm

100-240-53 Comfort Short - 13mm - 110cm

87, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge. Tél : 01 46 55 29 29 - Fax : 01 46 55 27 28

e-mail: novalab@wanadoo.fp

